



**OWEN MUMFORD**  
Making a World of Difference

**DEUTSCHLAND**

Owen Mumford GmbH  
Alte Häge 1  
63762, Großostheim  
T : +49 (0)6026/97750  
F : +49 (0)6026/977529  
E : info@owen-mumford.de

**HAUPTSITZ**

Owen Mumford Ltd  
Brook Hill, Woodstock  
Oxfordshire OX20 1TU, United Kingdom  
T : +44 (0)1993 812021  
F : +44 (0)1993 813466  
E : info@owenmumford.co.uk

**UK / IRLAND VERTRIEB & MARKETING**

T : +44 (0)1608 645555  
F : +44 (0)1608 646546  
E : info@owenmumford.co.uk

**FRANKREICH**

T : +33 (0)2 32 51 88 70  
F : +33 (0)2 32 21 96 95  
E : contact@owenmumford-fr.com

**NORDAMERIKA**

T : +1 800-421-6936  
F : +1 770-977-2866  
E : info@owenmumfordinc.com

**CHINA**

T : +86 (0)21 6032 3528  
F : +86 (0)21 6032 3782  
E : info@owenmumford.co.uk

[www.owen-mumford.de](http://www.owen-mumford.de)

**UNSERE AKKREDITIERUNGEN:**

- ISO13485 Zertifizierung
- Medizinprodukte Direktive 93/42/EEC
- CMDCAS 13485 (Kanad. Gesundheitsbehörde)
- Umwelt Management System ISO14001



AJ/1300-LT/ONBALEH/0515/GER

# Kontrollierte Selbstinjektion leicht gemacht



 **OWEN MUMFORD**

## Autoject<sup>®</sup> 2

Injektionshilfe für Insulinspritzen

Ein Grund zu lächeln



[www.owen-mumford.de](http://www.owen-mumford.de)

# Autoject® 2

## Injektionshilfe für Insulinspritzen

Niemand mag gerne Injektionen und für Patienten, die sich selbst injizieren müssen, ist es unangenehm und kostet einiges an Überwindung. **Autoject® 2** ist eine Injektionshilfe, die mehr Komfort bietet und einfach in der Handhabung ist. Auf Knopfdruck kann **Autoject® 2** mit einer voreingestellten Tiefe die Kanüle injizieren und so das Medikament problemlos verabreichen.

Für eine Injektion mit maximalem Komfort.

### Versteckte Nadel reduziert Unbehagen.

**Autoject® 2** verbirgt die Nadel vor der Injektion vor dem Auge des Anwenders, um die Angst vor der Nadel zu reduzieren, unter der viele Patienten leiden.

### Einhändige Handhabung zur besseren Auswahl der Injektionsstelle.

Da der **Autoject® 2** mit einer Hand bedient werden kann, stehen mehr Einstichstellen zur Auswahl als bei manueller Injektion mit Spritze. Der seitliche Auslöseknopf vereinfacht die Handhabung.

### Leicht zu bedienen. Ermöglicht mehr Patienten sich selbst zu injizieren.

Das ergonomische leicht zu bedienende Design erlaubt vielen Menschen, vor allem Kindern und Senioren sich selbst zu injizieren, womit sie mehr Unabhängigkeit mit dem Umgang Ihrer Medikation erlangen.

### Sicherheits-Mechanismus

Wenn **Autoject® 2** mit einer Spritze befüllt ist, hindert der Sicherheits-Mechanismus das vorzeitige Auslösen bis das Gerät gegen die Haut gedrückt wird und der Sicherheits-Mechanismus entriegelt.

## Weitere Vorteile

- Sichtfenster, auf dem das Ende der Injektion abgelesen werden kann.
- Sicherheitsblockierung – verhindert versehentliches Auslösen.
- Tiefeneinstellung für die richtige Einstichtiefe.
- Kompatibel mit vielen Spritzen verschiedener Hersteller.

## Autoject® 2 Produkte

**Autoject® 2** gibt es in zwei Ausführungen:

1. Für Patienten, die eine Spritze mit fixierter Nadel verwenden

### Autoject® 2 Fixed Needle

PZN 08537774



HERSTELLER	NAME	GRÖßE/ NADELLÄNGE
B. Braun	Omnican® 20 u. 50	0,5 ml/8 mm
B. Braun	Omnican® 40 u. 100	1,0 ml/8 mm
B. Braun	Omnican® 50	0,5 ml/12 mm
B. Braun	Omnican® 40 u. 100	1,0 ml/12 mm
BD	Micro-Fine™ U-40 / U-100	0,5 ml/8 mm
BD	Micro-Fine™ U-100	0,5 ml/12,7 mm
BD	Micro-Fine™ U-40	1,0 ml/8 mm
BD	Micro-Fine™ U-40 / U-100	1,0 ml/12,7 mm

2. Für Patienten, die eine Spritze mit wechselbarer Nadel verwenden.

### Autoject® 2 Removeable Needle

PZN: 00194406



HERSTELLER	NAME	GRÖßE/ NADELLÄNGE
B. Braun	Omnifix® 40 u. 100	1,0 ml
BD	Plastipak™	1,0 ml

Jeder **Autoject® 2** kommt in einer mit Reißverschluss versehenen Tasche und beinhaltet:

- 1 **Autoject® 2**
- Fixed Needle: 2 Aufsätze zur Tiefeneinstellung  
Removeable Needle: 1 Aufsatz zur Tiefeneinstellung
- 1 Gelber Vorspann-Einsatz mit Tiefenkontrolle
- 1 Gebrauchsanweisung



Im Bild: Autoject® 2 Fixed Needle Set